

Bactisan Wipe salviette disinfettanti pz.72

Codice del prodotto: AM04LH0010
Disponibilità: 19

Prezzo: € 10,00

Tax Ex: € 9,52

Short Description

Salviette disinfettanti per tutte le superfici

Descrizione

CLEAN TOP - BACTISAN WIPE SALVIETTE DISINFETTANTI

Salviette in tessuto-non-tessuto, imbibite di soluzione disinfettante per la disinfezione e deterzione a freddo di dispositivi medici in campo sanitario e laboratoristico.

CAMPI D'IMPIEGO:

decontaminazione dei dispositivi medici prima della pulizia e sterilizzazione.
Disinfezione di dispositivi medicalipuliti. Disinfezione delle attrezzature ospedaliere.
Disinfezione delle attrezzature della sala operatoria (carrelli, bacinelle, letti, mobili, ecc.).
Disinfezione dello studio odontoiatrico.

SPETTRO D'AZIONE:

disinfettante ad ampio spettro di azione rapidamente attivo, a freddo, sia su Gram positivi che su Gram negativi, batteri acido-resistenti e microbatteri. Attivo su virus lipofili, gruppo al quale appartengono HIV, HBV e HCV.

COMPOSIZIONE:

100 ml di soluzione imbibente contengono: - didecil-dimetilammonio cloruro g 0,5 - o-fenil-fenolo g 0,25 - coformulanti ed acqua q.b. a ml 100.
ogni salvietta contiene 4 ml di soluzione disinfettante.

MODALITA' D'USO:

per una disinfezione di emergenza, passare la salvietta sulle superfici e sui dispositivi

medici, prima dell'uso. Per l'eliminazione completa di tutti i microrganismi patogeni (escluse le spore), lasciare che la soluzione agisca per 5-10 minuti e risciacquare con acqua sterile.

CONTENUTO di 1 pack: 72 salviette